

Notice d'utilisation des Compresses à la paraffine Schmidt

Veuillez lire le mode d'emploi du début à la fin avant utilisation.

Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages causés par une utilisation inappropriée ou par la non observation du mode d'emploi.

ATTENTION : NE PAS PLIER A FROID !

Réchauffer la compresse uniquement en la faisant flotter dans un bain-marie !

L'eau ne doit bouillir en aucun cas !

Ne pas réchauffer au four ou au micro-ondes !

Il y a danger d'incendie en cas de réchauffement hors de l'eau !

Tenir à distance d'objets coupant ou pointus !

Conserver la compresse au sec et ne la mettre dans le bain-marie que pour la réchauffer !

Préparation :

Contrôlez avant chaque utilisation que la compresse ne présente aucune lésion et qu'elle est en bon état. Réchauffez la compresse à la paraffine uniquement au bain-marie à 52°C maximum.

ATTENTION NE PAS FAIRE BOUILLIR !

Au bout de 15 à 20 minutes, la paraffine est liquéfiée et la compresse est prête à l'emploi pour une durée d'environ 30 à 60 minutes.

Application :

N'appliquez pas la compresse réchauffée directement sur la peau, danger de brûlure !

Utilisez toujours une serviette ou un linge.

De cette manière, la chaleur rendue sera parfaitement dosée et la compresse refroidira moins vite.

Champs d'application :

- Troubles de la circulation sanguine
- Contractions musculaires
- Affections rhumatismales, sciatique
- Contusions anciennes, entorses, élongations
- Partout où un traitement par la chaleur est recommandé

La prudence s'impose en cas de :

Troubles de sensibilisation, inflammations.

Notice de nettoyage :

Nettoyage de la compresse au savon doux. Désinfection uniquement avec des produits solubles dans l'eau.